


# Käyttöohje

Henkilökunta on paikalla ja perehdyttää laitteen käyttöön sekä tarvittaessa tekee toimenpiteet puolestasi.

1. Kytke virta paine-/happilaitteeseen
2. Kytke virta viilennyslaitteeseen
3. Säädä kelloon aika 45/90min
4. Laita mittaristo päälle (paina kytkintä, kunnes valot syttyvät)



5. Pyöräytä venttiili kiinni
6. Mene tankkiin ja liu'uta ovi kiinni varovasti
7. Laita valot päälle
8. Liitä happiletku varovasti paikoilleen liittimeen
9. Käynnistä laitteisto
10. Käynnistä hapen tulo
11. Käynnistä tuuletin (fan)
  - tuulettimen teho nousee automaattisesti, kun paine on noussut 62 kPa
12. Sisäpuhelimella voit ottaa yhteyttä henkilökuntaan
13. Painemittarista voit seurata paineen nousua
  - paine nousee 62 kPa asti
  - paineen nousu kestää noin 10 min
  - paineen nousu voi tuntua korvissa, nieleskele tai sulje sieraimet ja puhalla

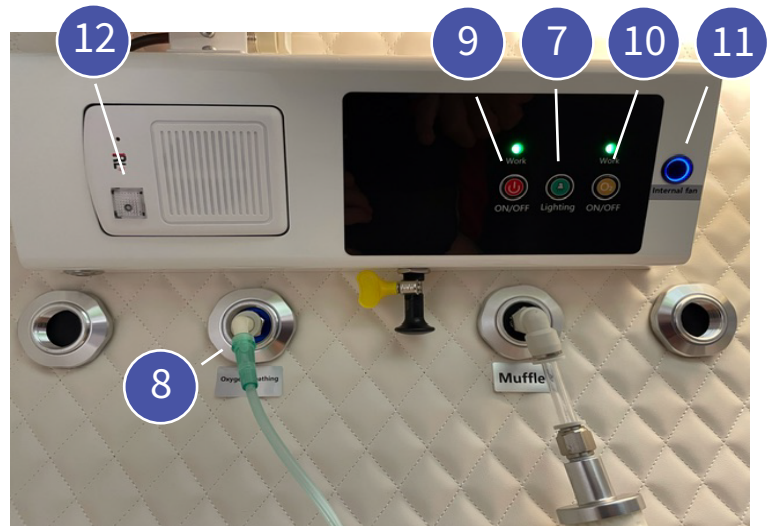

14. Ajan loputtua laitteisto sammuu automaattisesti
- ota maski/viikset pois
  - käännä paineen alennusventtiiliä **IV** -kohdalle, paine alkaa laskea
  - kun paine on laskenut tasolle 40 kPa, käännä venttiili **V** -kohdalle
  - kun paine on laskenut tasolle 30kPa, käännä venttiili **VI** kohdalle
  - kun paine on laskenut tasolle 20kPa, käännä venttiili kokonaan auki
  - paineen lasku kestää noin 6 min (10kPa/1min)
  - kun paine on laskenut nolnaan, ovi aukeaa ja voit liu´uttaa oven auki ja poistu tankista.
  - ota oma maski/viikset mukaasi

14



14



15. Sammuta lopuksi päävirrat laitteista 1 ja 2

